



ТЕСТ-ПОЛОСКИ

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ



с флюоресцеином

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ◆ Для комфортного применения перед использованием увлажнить край полоски с красителем одной-двумя каплями стерильного физиологического раствора.
- ◆ Смоченным краем полоски коснуться конъюнктивы или свода глаза.
- ◆ Попросить пациента несколько раз моргнуть для равномерного распределения флюоресцеина.

Оценка результатов:

◆ *Диагностика эпителиальных повреждений:* после инстилляции в конъюнктивальную полость пациента просят поморгать несколько раз, после чего проводят исследование на щелевой лампе с использованием синего фильтра. Окрашивание роговицы: тест расценивается как положительный при обнаружении в роговичном эпителии любого количества дефектов.

◆ *При установлении характера и инвазивного времени разрыва слезной пленки для выявления и оценки ССГ:* время разрыва слезной пленки определяют при помещении полоски в конъюнктивальную полость и наблюдают за появлением в ней разрывов – темных пятен в виде черной дыры или щели на фоне окрашенной слезной пленки в свете щелевой лампы; время измеряют в секундах с момента окрашивания глаза. Норма разрыва слезной пленки 10 секунд и более.

◆ *Оценка высоты слезного мениска:* Высота слезного мениска дает количественную оценку слезной пленке, в норме составляет 0,2 мм и более. Около 75% объема слезы находится в слезном мениске. Снижение высоты слезного мениска позволяет диагностировать ССГ с дефицитом водной фазы.

◆ *В подборе посадки жестких (ортокератологических) контактных линз на глаз:* исследуют распределение флюоресцеина под линзой, надетой на глаз, в синем (кобальтовом) свете щелевой лампы с желтым фильтром раттена для увеличения контраста: при идеальной посадке флюоресцеин под жесткой линзой распределяется согласно зонам с небольшим увеличением в краевой зоне линзы для адекватного обмена слезы.